

DDcontrast® firing paste

Proprietăți:

DD contrast® firing paste - pastă de ardere ceramică pentru fixare

- Stabilizează structurile ceramice în timpul procesului de ardere.
- Se îndepărtează fără resturi, prin simpla suflare cu aer comprimat.
- Nu rămân zgârieturi după ardere.
- Nu necesită timp pentru uscare.



Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați o mică cantitate de pastă, direct din seringă, în interiorul coroanei, respectiv pe fața posterioară a fațetelor și inlay-urilor. Aveți grijă ca materialul să nu ajungă pe suprafețele vizibile.

Fixați și ajustați structura pe pinul plăcuței de ardere sau așezați direct pe aceasta (în acest caz puneți material puțin în exces). Nu este necesar să așteptați pentru uscare. Ultimul pas îl constituie pornirea ciclului de ardere în modul obișnuit. DD contrast® firing paste nu necesită ajustări ale ciclurilor de ardere.

După ardere, curățați DD contrast® firing paste cu un jet de aer comprimat.

Vă rugăm nu reutilizați pasta după ardere deoarece materialul se contractă puțin și nu se poate garanta stabilitatea pentru cicluri ulterioare de ardere.

DD contrast® firing paste conține mici fibre care pot înfunda vârful seringii – desfundați ușor cu un vârf ascuțit.

Imediat după utilizare repuneți capacul, pentru a preveni uscarea materialului!